



BRUGSANVISNING

Somna Kædedyne® Sensitive

I denne variant af Kædedynen®, er den polstrede side dobbelt så polstret som standard Kædedynen®.

Find ro og oplev bedre søvnkvalitet med Kædedynen® Sensitive.

Kæderne i de langsgående kanaler gør, at Kædedynen® Sensitive falder tæt til kroppen. Tyngden og de taktile stimuli fra kæderne giver en følelse af, at være omsluttet med et behageligt, dybt tryk. Dette skaber øget kropsafrænsning, mere tryghed og ro – og dermed bedre søvnkvalitet.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER:

- Neuropsykiatriske diagnoser (F.eks. ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Autisme og Tourettes syndrom).
- Psykisk ubalance
- Demens tilstande

- Hjerneskade
- Søvnproblemer
- Spasticitet
- Neurologiske lidelser
- Uro, angst og "tankemylder"
- Spiseforstyrrelser
- Motorisk uro og ufrivillige bevægelser
- Generel nedsat trivsel og nedsat overskud

VARIANTER

Voksen ca:

- 5 kg • 7 kg • 9 kg • 11 kg

Mål ca: 202 x 140 cm

TILBEHØR

- Dynebetræk, inkontinens
- Dynebetræk, bomuld
- Vaskepose, medfølger v/køb
- Transporttaske, medfølger v/køb



Kædedynen® Sensitive former sig efter kroppen og ligger således tæt omkring kroppen.

Anvendelse

Kædedynen® Sensitive har en unik 2-i-1-funktion, idet Kædedynen® Sensitive har 2 forskellige sider: En blød, ekstra polstret side samt en side med knap så meget polstring, hvor de taktile stimuli fra kæderne opleves kraftigst. Hvilken side man foretrækker vil være individuelt, så man bør prøve sig frem. Man kan således graduere og variere stimuli efter behov.

Brug Kædedynen® Sensitive som almindelig dyne om natten og evt. som beroligende og afstressende tæppe om dagen, i sofa eller hvilestol, hvor dynen kan lægges dobbelt og give en behaglig ro og samling på kroppen.



Ekstra polstret side.



Kædeside.

Kædedynen® Sensitive er fremstillet så den er både åndbar og behagelig, året rundt. Synes man den er for kold evt. i de kølige vinternætter, kan den sagtens kombineres med en almindelig dyne eller et tæppe.

Kædedynen® Sensitive anvendes blot som almindelig dyne og anvendes i almindeligt dynebetræk, evt. hygiejnebetræk/inkontinensbetræk, ved behov.



I Kædedynen® Sensitive, er den polstrede side dobbelt så polstret som standard Kædedynen®.

VASKEANVISNING



Kædedynen® Sensitive skal altid vaskes i den medfølgende vaskepose.



Kædedynen® Sensitive vaskes ved max 60 grader på skåneprogram.



Kædedynen® Sensitive med lynlås er delbare. Disse kan vaskes ad 2 omgange, hvis maskinens kapacitet er begrænset.



Reconditionering kan udføres ved 70 grader.



Kædedynen® Sensitive tåler ikke blegemiddel.



Kædedynen® Sensitive tåler ikke strygning.



Kædedynen® Sensitive tåler ikke kemisk rens. Der må ikke anvendes stærkere vaskemidler end perkloretylen.



Kædedynen® Sensitive må ikke tørretumbles. Den tørrer hurtigt når den hængetørres.

PRODUKTINFORMATION



Kædedynen® Sensitive er fremstillet i Trevira CS, som er et brand- og flamme-hæmmende materiale. Dette opfylder kravene i SS-EN ISO 12952-1/2.



Kædedynen® Sensitive er patenteret.



Kædedynen® Sensitive er et svensk produkt.



Kædedynen® Sensitive er CE-godkendt.

Fremstillet i Stenkullen, Sverige.

ADVARSEL

Ved nedsat hjerte- og lungefunktion bør anvendelse af Kædedyne® Sensitive drøftes med egen læge inden brug.

Vær opmærksom på risiko for faldulykke, hvis Kædedynen® Sensitive ligger på gulvet.

Ved indopererede effekter i kroppen, bør brug af Kædedyne® Sensitive drøftes med egen læge inden brug.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:



ZiboCare A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@zibocare.dk

20160502