



Pressure Lejringsortiment

Lejring | Aflastning | Tryksårsforebyggelse



ZiboCare

Lejring

Lejring

Tryksårsforebyggende og støttende lejring

Maksimal støtte og øget velvære

Gør livet meget lettere for brugerne, fordi det er blødt og smyer sig til kroppen, ligger stabilt og ikke er varmeproducerende.

Let håndtering

Gør livet lettere for plejepersonalet, fordi de vejer meget lidt og er uhyre lette at arbejde med, også når det drejer sig om lejring af smerteprægede, deformerede patienter, som det ellers kan være meget svært at lejre rigtigt og sikkert.

Kvalitetssortiment til mange lejringssituationer

Lejringsprodukterne består af mikrokugler af finkornet polystyren omgivet af et bielastisk polyurethanovertræk, som er forbehandlet mod mikrober. Denne konstruktion medfører en helt unik krops- og temperaturlpasning, samt god hygiejne. Dette sortiment er udviklet efter plejepersonalets udtrykte behov til forskellige, krævende plejesituationer.

Designet til at tage kampen op mod tryksår

Lejringsprodukterne er designet til anvendelse ved tryksårstruede patienter med meget forskellig morfologi. Det er velkendt at hyppig forflytning og anbringelse i forskellige aflastende liggestillinger nedbringer risikoen for tryksår.

Tryksårsforebyggende
lejring for

1. Hoved og øre

Tryksår sker typisk på occiput eller øret. Dette sker enten via en tung ubevægelig hovedstilling i en for hård eller for lille hovedpude. Her er det vigtigt at man danner et O-tryk omkring det tryktruede område, eller giver den nødvendige støtte på resten af hovedet, for at aflaste trykket på det afficerede område.

OBS: betrækket på puden skal være glat for at undgå shear.

Universalpude

CareWave universalpude til
mange formål

Støtter patienter i abdominalre-
gionen, samtidig med at produktet
"decubitus lateral" støtter ryggen
i sidelejring.

Kan understøtte lokalt i knære-
gionen og understøtter meget
tynde ben, malleolerne, achil-
les-området og underben for at
lette trykket i fodområdet.

Tekniske data

x-small | 45x30 cm
HMI nr.: 69638
Varenr.: 61001001

60x40 cm
HMI nr.: 43931
Varenr.: 61000001



Universalpude

Poz' in' Form® universal
lejringspude

Støtter patienter i abdominalre-
gionen, samtidig med at produktet
"decubitus lateral" støtter ryggen
i sidelejring.

Kan understøtte lokalt i knære-
gionen og understøtter meget
tynde ben, malleolerne, achil-
les-området og underben for at
lette trykket i fodområdet.

Tekniske data

Str. 1 | 35x25 cm
HMI nr.: 105545
Varenr.: 22901

Str. 2 | 55x40 cm
HMI nr.: 105547
Varenr.: 22902

Str. 3 | 40x15 cm
HMI nr.: 105548
Varenr.: 22903

Vandtæt betræk medfølger



Halvmånepude

Poz' in' Form®

I kombination med Cylinderpuden bruges denne pude til at forhindre tryk og friktion mellem knæene, samt holde hofterne abduktseret. Den kan også bruges under nakken, for at fordre til en bedre cervical position.

Tekniske data

200x30 cm
HMI nr.: 105551
Varenr.: 22920



Halskrave


Poz' in' Form®

Denne pude kan bruges omkring nakke til at opnå mere komfort i ligge stillingen, forhindre tryk på baghovedet og sikre en bedre cervical position.

Giver behagelig støtte til hovedet når patienten er i sideleje. Kan også anvendes i siddestilling hvor hovedstøtte er nødvendig.

Tekniske data

135x21 cm
HMI nr.: 105552
Varenr.: 22965

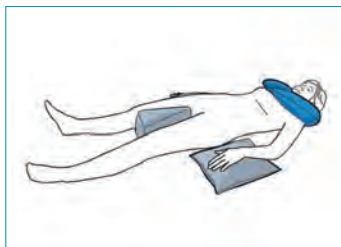

Hovedaflastningspude

Poz' in' Form®

Tryksårsforebyggende pude til trykaflastning af hoved. Hullet i puden sikrer en optimal positionering og tryksårsforebyggende effekt i hovedområdet. Kombinationen af memoryskum og microfiber tillader god trykaflastning ved kontaktområder.

Tekniske data

50x40x9 cm
HMI nr.: 105559
Varenr.: 22990



GeoMatt Hovedpude

Ergonomisk udformet

GeoMatt er udviklet med fokus på maksimal trykaflastning og shear nedsættelse. Den er ergonomisk udformet i det patenterede og dokumenterbart effektive trykaflastningsmateriale GeoMatt. I modsætning til flade celler eller æggebakkesystemer, tillader GeoMatts individuelle underskårne celler, at overfladen kan deformeres og tilpasse sig forskellige kropskonturer.

Tekniske data

40x50x11 cm
HMI nr.: 62482
Varenr.: 6300-0000



Tryksårsforebyggende
lejring for

2. Ryg og skulder

Tryksår sker typisk omkring overgangen mellem brystdelen og halsdelen ved rygraden eller omkring skulderbladene. Her er det vigtigt at få aflastet det enkelte område med hyppige stillingsskift, netop omkring skulderpartiet, for at opnå den ønskede effekt.

Den bløde banan

Understøtter ryggen

Understøtter ryggen i sideleje evt. sammen med produktet "decubitus lateral" ved at anbringe den dorsalt i brysthøjde.

Støtter patienten i siddestilling, hvis patienten har en tendens til at "vælde" til siden.

Tekniske data

180x31 cm
HMI nr.: 43933
Varenr.: 61000002



Decubitus lateral

Kropsstøtte

Tilpasses patientens stilling og form når den anbringes langs ryggen med patienten i sideleje (30°).

Støtter fra skuldrene langs ryggen, hoftepartiet, knæ og malleoler og nedsætter friktionen fra lejringsfladen.

Tekniske data

180x31 cm
HMI nr.: 43934
Varenr.: 61000003



Lateral zig-zag lejringspude

Poz' in' Form®

Zig-zag lejringspuden bruges på sideleje og sikrer komfortabel støtte omkring skulder, ryg, hofter og knæ.

Ydermere kan den bruges til at reducere shear og friktion.

Tekniske data

185x35 cm

HMI nr.: 105555

Varenr.: 22930



Tryksårsforebyggende
lejringsfor

3. Hofte


Tryksår opstår på det yderste knoglefremspring (trochantor major). Dette ses typisk ved folk, der kun kan ligge på én side, grundet sygdom eller gammel vane. Hvis det stadig kun er muligt at leje på den afficerede side, kan man leje patienten i forskellige vikler. 30 grader, 45 grader og 90 grader. Den optimale tryksårsløjring sker i en 30-graders sideliggende stilling. OBS på hæle.

Lateral zig-zag lejringspude Poz' in' Form®

Zig-zag lejringspuden bruges på sideleje og sikrer komfortabel støtte omkring skulder, ryg, hofter og knæ. Ydermere kan den bruges til at re-ducere shear og friktion.

Tekniske data

185x35 cm
HMI nr.: 105555
Varenr.: 22930

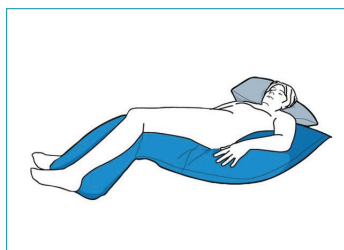


Trekant lejringspude Poz' in' Form®

Denne pude tilpasser sig til alle morfologier. Placeres under knæene, for at understøtte knæleddet. Det vil forhindre bru-geren i at glide nedad i sengen og reducerer samtidig friktion og forskydning i sakrumområdet.

Tekniske data

56x32x28 cm
HMI nr.: 105544
Varenr.: 22910

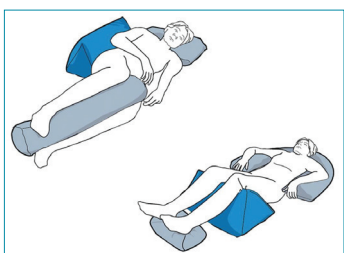

Cylinderpude

Poz' in' Form®

Støtter i sideleje, når den placeres mellem benene. Både indersiden af knæ samt ankelknyste aflastes.

Tekniske data

75x18 cm
HMI nr.: 105543
Varenr.: 22940



Halvmånepude

Poz' in' Form®

I kombination med Cylinderpuden bruges denne pude til at forhindre tryk og friktion mellem knæene, samt holde hofterne abduktseret. Den kan også bruges under nakken, for at fordre til en bedre cervical position.

Tekniske data

200x30 cm
HMI nr.: 105551
Varenr.: 22920



Tryksårsforebyggende
lejringsfor

4. Os Sacrum og tuber ischiadicum

For at undgå tryksår eller behandle disse på bagdelens knoglefremspring, er det vigtigt at stilling og lejrings skiftes ca. hver 1½ time. Disse knoglefremspring er særlig udsatte, da det er der, man i liggende stilling trykker hårdest ned på den underliggende madras. Her anbefales det at leje i en 30-graders vinkel. OBS: tryksår på halebenet forekommer ikke af den liggende stilling, da denne ikke er berøring med underlaget. Hvis patienten har tryk på halebenet, stammer det fra den siddende stilling – enten i stol eller seng.

Decubitus lateral

Kropsstøtte

Tilpasses patientens stilling og form når den anbringes langs ryggen med patienten i sideleje (30°).

Støtter fra skuldrene langs ryggen, hoftepartiet, knæ og malleoler og nedsætter friktionen fra lejrings-fladen.

Tekniske data

180x31 cm
HMI nr.: 43934
Varenr.: 61000003



Cylinderpude

Poz' in' Form®

Støtter i sideleje, når den placeres mellem benene. Både indersiden af knæ samt ankelknyste aflastes.

Tekniske data

75x18 cm

HMI nr.: 105543

Varenr.: 22940



Trekant lejringspude

Poz' in' Form®


Denne pude tilpasser sig til alle morfologier. Placeres under knæene, for at understøtte knæleddet. Det vil forhindre bru-geren i at glide nedad i sengen og reducerer samtidig friktion og forskydning i sakrumområdet.

Tekniske data

56x32x28 cm

HMI nr.: 105544

Varenr.: 22910

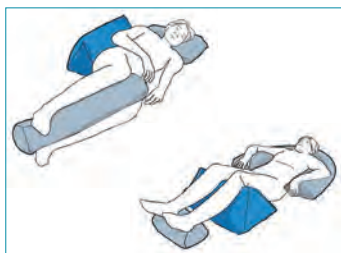

Tryksårsforebyggende
lejring for

5. Ben og hæle

Ben og hæle er et meget udsat område for tryksår. Det skyldes den tynde hud omkring hælen, ankelknysterne og knysten ved lilletåen. Tryksår på disse områder, kan afhjælpes på mange måder. Det rigtige valg til den enkelte afhænger af mange faktorer – såsom underlag, fodstørrelse, varmeudvikling, fugt og evt. deformiteter.

Cylinderpude

Poz' in' Form®

Støtter i sideleje, når den placeres mellem benene. Både indersiden af knæ samt ankelknyste aflastes.

Tekniske data

75x18 cm

HMI nr.: 105543

Varenr.: 22940



Hælbeskytter

Tilpasser sig brugers stilling
og form

Egnet til at skabe 0-tryk under hælen og beskytter malleolerne. Hælbeskytteren følger med når patienten flytter fødderne.

Den er ikke egnet til patienter med knækontrakturer.

Designet til forskellige positioneringer.

Behageligt og køligt materiale.

Tekniske data

26x15,5 cm

HMI nr.: 43941

Varenr.: 6100-0008

Vaskbart betræk i bomuld eller polyurethan er tilgængeligt.




Trekant lejringspude

Poz' in' Form®

Denne pude tilpasser sig til alle morfologier. Placeres under knæene, for at understøtte knæleddet. Det vil forhindre bru-geren i at glide nedad i sengen og reducerer samtidig friktion og forskydning i sakrumområdet.

Tekniske data

56x32x28 cm
HMI nr.: 105544
Varenr.: 22910

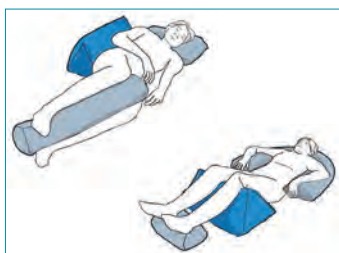

1-fods hælpude

Poz' in' Form® hælaflaster

Pudens formål er at flytte trykket fra hælen til læggen.

Denne bruges under achilles-senen, så der opnås 0-tryk på hælen. Samtidig sikrer den en komfortabel aflastning af achilles-senen. Hælaflasteren holder ankelledet i korrekt position. Kan også benyttes som den vandre-pude.

Tekniske data

48x30x12 cm
HMI nr.: 105556
Varenr.: 22985



Hællejringspude m/strop

Poz' in' Form®

Placeres i bunden af sengen, under brugerens fodled. Her sættes den fast med den justerbare strop. Hermed kan man hurtigt og nemt opnå nul-tryk på hælene, samt holde fodledet i korrekt position.

Tekniske data

85x25 cm
HMI nr.: 105557
Varenr.: 22970

Vandtæt betræk medfølger



1-fods hælpude

Poz' in' Form® hælaflaster

Pudens formål er at flytte trykket fra hælen til læggen.

Denne bruges under achilles-senen, så der opnås 0-tryk på hælen. Samtidig sikrer den en komfortabel aflastning af achilles-senen. Hælaflasteren holder ankelleddet i korrekt position.

Kan også benyttes som den vandrede pude.

Tekniske data

48x30x12 cm

HMI nr.: 105556

Varenr.: 22985



Hællejringspude m/strop

Poz' in' Form®

Placeres i bunden af sengen, under brugerens fodled. Her sættes den fast med den justerbare strop. Hermed kan man hurtigt og nemt opnå nul-tryk på hælene, samt holde fodleddet i korrekt position.

Tekniske data

85x25 cm

HMI nr.: 105557

Varenr.: 22970

Vandtæt betræk medfølger



Har du prøvet PressurePads?

En nem, enkel og omkostningseffektiv løsning til forebyggelse af tryksår



Hvad er PressurePads?

Er din patient i risiko for at udvikle tryksår, eller har tryksår i kategori 1, så kan du med fordel anvende PressurePads, til forebyggelse af

- Yderligere udvikling af grad 1 tryksår.
- Risiko for udstyrsrelateret tryksår.
- At nyligt hegede sår ikke genopstår.


Trykfordelende og rehydrerende hjælpemiddel

PressurePads er et trykfordelende hjælpemiddel, der forebygger vævsskader forårsaget af tryk, tid og shear. De forebygger desuden nyligt hegede tryksår i at opstå på ny. PressurePads indeholder polymer gel og mineralske olier. Den mineralske olie rehydrerer huden, og gør den dermed stærkere.

Virkningsmekanismer



Trykfordeling – trykket fordeles ud over en større flade.

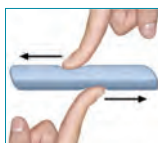

Reducerer shear og friktion.



Modstandsdygtig over for højt tryk.



Pad

10x10x0,3 cm 20x20x0,3 cm
10x10x1,2 cm 20x20x1,2 cm



Strip

30x5x0,3 cm
50x2,5x0,3 cm



Hæl

Small
Large



Sacrum

One size

