

Care

Trykaflastende og vendbar skummadras

Care er en trykreducerende skummadras med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Care er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.



Materiale og opbygning

Care er med højelastisk koldskum, der er opskåret på begge sider med forskellige nedskæringsdybder, samt inkontinensbetræk. Care Madrassen er opdelt i 5 zoner så det svarer til kroppens trykpunkter. Den er desuden forsynet med en bred skumkant for at sikre en bedre stabilitet ved mobilisering ind og ud af madrassen.

Vendbar for længere levetid

Care er lavet som en vendbar skummadras (på begge sider), så levetiden forlænges yderligere ved brug af et vende- og drejeregime. Betræk og madras er tydelig mærket bund og top.

Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og

vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig at skumkernen og betrækket glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvilken side man står ved. Håndtagene er forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

Rengøring


Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Kontakt vores produktspecialister for at høre mere om vores produkter

Care

Trykaflastende og vendbar skummadras

Care er en trykreducerende skummadras med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Care er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.

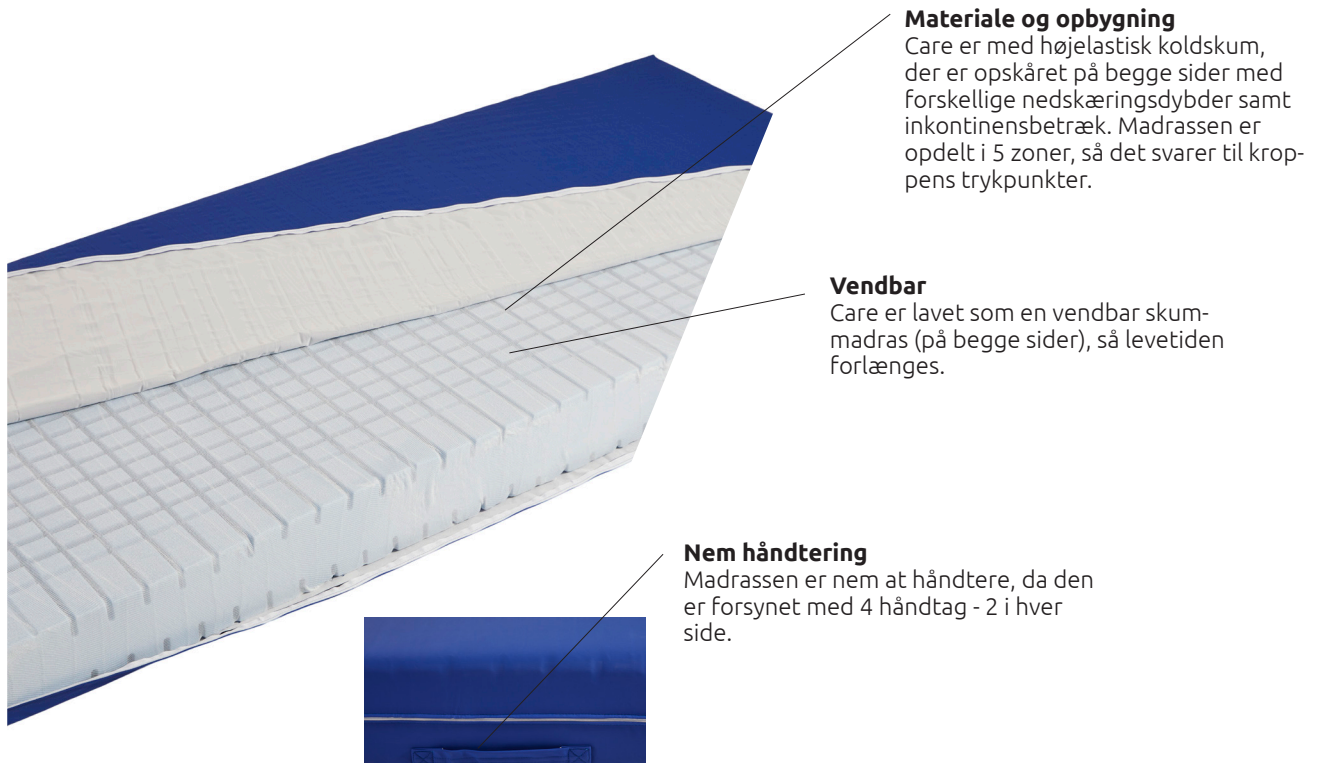

Materiale og opbygning

Care er med højelastisk koldskum, der er opskåret på begge sider med forskellige nedskæringsdybder samt inkontinensbetræk. Madrassen er opdelt i 5 zoner, så det svarer til kroppens trykpunkter.

Vendbar

Care er lavet som en vendbar skummadras (på begge sider), så levetiden forlænges.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag - 2 i hver side.

Tekniske data

Care findes i flere størrelser:

80x200x14 cm

HMI nr.: 52222

Varenr.: 10-007040

85x200x14 cm

HMI nr.: 54701

Varenr.: 10-007042

83x200x14 cm

HMI nr.: 87639

Varenr.: 10-007041

90x200x14 cm

HMI nr.: 53092

Varenr.: 10-007186

Kan rekvireres i andre størrelser.

Brugervægt: 0-150kg

Vægtfylde: 52 kg/m³ = høj levetid

Materiale: Madras: Brandhæmmende HR PURskum med høj elasticitet
Betræk: Åndbart og strækbart

Madrasmvægt: 11,5 kg

Praktisk anvendelse: Betrækket er udstyret med 4 håndtag, så madrassen er let at håndtere