



Tekniske data

80x200x20 cm HMI nr.: 87027 Varenr.: MDYF1000	105x200x20 cm HMI nr.: 87030 Varenr.: MDYF1120
85x200x20 cm HMI nr.: 87028 Varenr.: MDYF1100	120x200x20 cm HMI nr.: 87031 Varenr.: MDYF1130
90x200x20 cm HMI nr.: 87029 Varenr.: MDYF1110	



CuroCell UNO

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

CuroCell UNO er et brugervenligt, fuldautomatisk vekseltryksystem til højrisiko og til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Batteri back-up funktion

Batteri back-up funktionen sikrer, at batteriet overtager pumpen i 8 timer i tilfælde af manglende tilslutning til el-net. Pumpen giver kort alarm når batteriet tager over og restbatteritid vil vises via advarselsslamper. Når batteriet er ved at være afladet vil grøn knap blinke og give alarm.

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter brugers vægt og pumpen kører med en cyklus på 10 minutter, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Madrassen består af 22 tværgående celler, de 6 nederste celler er mindre, derved mindskes trykket under hælene. Cellerne er lavet af en tynd, elastisk og smidig PU kvalitet, som kan udskiftes individuelt.

Under alle cellerne i madrassen findes en sikkerhedsmadrass, som består af luft. Denne sikrer at brugeren aldrig kommer til at ligge direkte på sengebunden.

Pumpe med flere funktioner

Pumpen kan indstilles til vekseltryk, statisk funktion, pulsation og autofirm funktion. Indstilles pumpen til auto-firm/pleje/forflytnings-funktion, pumpes madrassen maksimalt op for optimal stabilitet ved eks. forflytning eller fysioterapi. Autofirm slår automatisk tilbage efter 20 minutter, men kan manuelt slås fra når som helst.

Indstilles pumpen til statisk funktion er madrassen stillestående uden vekseltryk og lufttrykket er tilpasset patientens vægt. Den statiske indstilling vil automatisk stoppe efter 2 timer, men kan manuelt slås fra når som helst.

Pulsation-funktionen øger og letter trykket i alle celler på én gang og giver dermed en rolig liggeflade.

PU-madrassetræk

PU-betrækket er semipermeabelt, smidigt og strækbart i 2 retninger med lynlås hele vejen rundt. Printet indikerer foldende. Nem og hurtig CPR-funktion for hurtig lufttømning, er placeret på luftslangen tæt ved pumpen.

CuroCell UNO

Egenskaber

Pumpe

- Fuldautomatisk støjsvag pumpe, som indstiller sig selv efter brugerens vægt.
- Autofirm-funktion slår automatisk tilbage efter 20 min.
- Alle funktionerne betjenes vha. et topbetjent panel.
- Arbejder i 1-2 system med en cyklustid på 10/15/20/25 min.
- Strømforbrug max 30 W, maksimal ydelse ved opstart af madrassen, ellers ca. 10 % af maksimal ydelse.
- Transportfunktion med vekselryk via batteri backup.
- Visuel samt akustisk alarm ved lavtryk, højtryk, elektronisk ventilfejl samt ved næsten tomt batteri.
- Høj batterikapacitet på 1060 mAh – 8 timer ved fuld opladning.

Elektricitet	AC230V, 50/60 Hz, 0,07A
Cyklustid	10/15/20/25 min.
Dimensioner	H: 15,6 cm/B: 38,7 cm/D: 25,1 cm
Pumpe vægt	5,2 kg
Rengøring	Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektions midler på en opvredet klud.

Madras

- 20 cm høj dynamisk madras når den er luftfyldt.
- Sammensat af 22 tværgående celler, hvoraf de 2 i hovedsektioner er statiske.
- 6 mindre celler i helsektion sikrer god hælaflastning.
- Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.
- Åndbart og brandhæmmende inkontinens PU-betræk, strækbart i alle retninger.
- Stropper til fastgørelse af madrassen til sengens bevægelige dele, samt strop til fastgørelse af sammenpakket madras.
- Sædeparti designet så der ydes størst mulig stabilitet ved ind- og udstigning.
- Integreret ledningsholder.

Brugervægt	Max 250 kg
Madrasvægt	11 kg
Sammensætning	22 luftceller
Materiale	Betræk: PU Celler: PU Sikkerhedsceller: PU
Rengøring	Madrassen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.