



Tekniske data

48x37 cm
Dreampad Slim
 HMI nr.: 100873
 Varenr.: Dreampad Slim

60x45 cm
Dreampad Soft
 HMI nr.: 100874
 Varenr.: Dreampad Soft



Dreampad

Innovationsteknologi til bedring af hverdagsproblematikker

For lidt søvn eller for ringe søvnkvalitet er i dag årsag til en række problemer i hverdagen for mange mennesker. Nedsat koncentration, irritabilitet, humørsvingninger, et svækket immunsystem og generel dårlig trivsel bliver en følge af manglende eller dårlig søvn. Kroppen udløser stresshormoner når den er i søvnunderskud, som igen gør søvn vanskelig – og et dårligt søvn mønster er sat i gang.

Bedre søvnkvalitet

En Dreampad er en hovedpude, der hjælper til bedre søvnkvalitet, ro og afslapning. Den er derfor god ved stress, angst, depression, ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer.

Intrasound Teknologi™

Dreampads har indbygget såkaldt "Intrasound Teknologi™" der gør, at brugeren har mulighed for at lytte til specialproduceret musik, som gennem vibrationer til kranieknoglerne føres til det indre øre – og kun kan høres af den, som hviler sit hoved på puden. De blide toner bidrager til ro, både mentalt og motorisk. En tilstand der er blevet beskrevet som ren "massage til nervesystemet".

Produktudvalg

Dreampads fås hos os i 2 varianter:

Variant

Størrelse

Dreampad Slim	48 x 37 cm
Dreampad Soft	60 x 45 cm

Anvendelse

Ved ibrugtagning installeres en app på en smartphone, tablet eller iPod. Via app'en vælges mellem 5 forskellige musikmuligheder og ønsket lydstyrke.

Dreampads anvendes i almindelige pudebetræk eller i hygiejnebetræk.

Materiale og vask

Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må derfor ikke vaskes. Materialet er hypoallergent og giftffrit.

Tilbehør

Blue Tooth sæt

Dreampad Blue Tooth sæt

Pudebetræk Slim

Bomuldsbetræk
 hygiejnebetræk

Pudebetræk Soft

Bomuldsbetræk

Dreampad

Brugervejledning

Dreampad musik er udviklet specielt til en teknologi, kaldet Intrasound Teknologi™, og består af frekvenser, som virker afslappende og beroligende.

Download app før brug

Download Dreampad App i iTunes AppStore eller Google Play. App'en har en indbygget timer, der kan indstilles til automatisk at afbryde musikken. En alarm kan ligeledes indstilles til vækning med musik. Ved brug af indkøbt Dreampad Bluetooth sæt, må denne oplades før ibrugtagning og herefter parres med smartphone, iPod eller tablet. Læs yderligere herom i afsnittet omkring Bluetooth sæt.

Brug af Dreampad med App

Step 1	Download den tilhørende app Dreampad til smartphone, iPod eller tablet.
Step 2	Tilslut smartphone, iPod eller tablet til det stik, der findes i sidelommen på Dreampad.
Step 3	Vælg ønsket musik og styrke via App'en Dreampad.
Step 4	Placer hovedet på Dreampad'en og slap af.

Ønsker man ikke sin smartphone, iPod eller tablet direkte forbundet med puden, kan bluetooth sæt købes og anvendes.

Brug af Dreampad med Bluetooth sæt

Step 1	Oplad Bluetooth.
Step 2	Sørg for at parre smartphone, iPod eller tablet med Bluetooth. Dette gøres således: Tryk på multifunktionsknappen i 3 sekunder, indtil der kommer blåt og rødt blink. Søg efter Bluetooth på din smartphone, iPod eller tablet og vælg "MPOW". Tænd Bluetooth inden du trykker på multifunktionsknappen i 3 sekunder. Oplad Bluetooth dagligt.

Vigtig information

- Ved sygdom og sårbarhed anbefales det, at brugen af Dreampad startes langsomt op således: Brug lav lydstyrke og korte sessioner af 10-20 minutter den første uges tid. Efterfølgende kan man øge brugen med 15 minutter indtil man når op på 3 timer – eller op på det omfang, man ønsker.
- Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må ikke vaskes. Anvend Dreampads i dynebetræk.
- Materialet er hypoallergent og giftfrit.
- Dreampad er ikke et medicinsk produkt og ikke omfattet af lovgivning herom.
- Der er 2 års garanti på produktet i DK, såfremt det behandles efter foreskrifterne. Ved evt. reklamation bedes købsfaktura dokumenteres.
- Må ikke anvendes til børn under 2 år. Lad ikke børn under 1 år være alene med Dreampad.