



Tekniske data

Madras

80x200x12 cm

HMI-nr.: 84147

Varenr.: MDYT1073

Elektricitet

AC230V

50/60 Hz, 0,07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

Pumpe (inkl.)

2,3 kg | 29x20x11 cm

Cyklus tid:

10/15/20/25 min.



Pro-care 3

Dynamisk trykaflastende topmadras

Den trykaflastende topmadras Pro-care 3 består af 17 enkelte luftceller, der hver er 12 cm. høje, og en integreret lomme til en skum-sikkerhedsmadras. 9 af cellerne har LOW-AIR-LOSS funktion, som bortleder både fugt og varme og på den måde holder brugerens hud tør.

Madrasen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2 og 3.

Individuel tilpaning af cyklostid

Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Regulerbar cyklostid med mulighed for indstilling til 15, 20 og 25 min.

Pumpefunktioner

Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Autofirm og statisk slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Hygiejnisk betræk

Betrækket er strækbart, det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Rengøring

Madrasen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Brugervægt	40-180 kg
Madras-sammensætning	17 single celler 12 cm høje
Materiale	Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt Celler: Nylon/PU, blå Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt
Pumpe	• Lydsvag • 10 komfortniveauer • Dynamisk/statisk maxfirm seat inflate • Audiovisuel alarm • Panellås
Funktion	Integreret ledningsholder
Vedligeholdelse	Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og evt. reparation