




ZiboCare

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

51x51x7x7 cm HMI nr.: 61207 Varenr.: CLB2020	61x61x7x7 cm HMI nr.: 65041 Varenr.: CLB2424
51x56x7x7 cm HMI nr.: 50007 Varenr.: CLB2022	64x70x7x7 cm HMI nr.: 100995 Varenr.: CLB2528
51x61x7x7 cm HMI nr.: 77005 Varenr.: CLB2024	66x50x7x7 cm HMI nr.: 88269 Varenr.: CLB2620
56x46x7x7 cm HMI nr.: 77003 Varenr.: CLB2218	71x51x7x7 cm HMI nr.: 85123 Varenr.: CLB2820
56x51x7x7 cm HMI nr.: 77002 Varenr.: CLB2220	70x61x7x7 cm HMI nr.: 100999 Varenr.: CLB2824
56x53x7x7 cm HMI nr.: 100996 Varenr.: CLB2221	76x56x7x7 cm HMI nr.: 69682 Varenr.: CLB3022
56x56x7x7 cm HMI nr.: 77004 Varenr.: CLB2222	81x56x7x7 cm HMI nr.: 101000 Varenr.: CLB3222
61x51x7x7 cm HMI nr.: 77001 Varenr.: CLB2420	

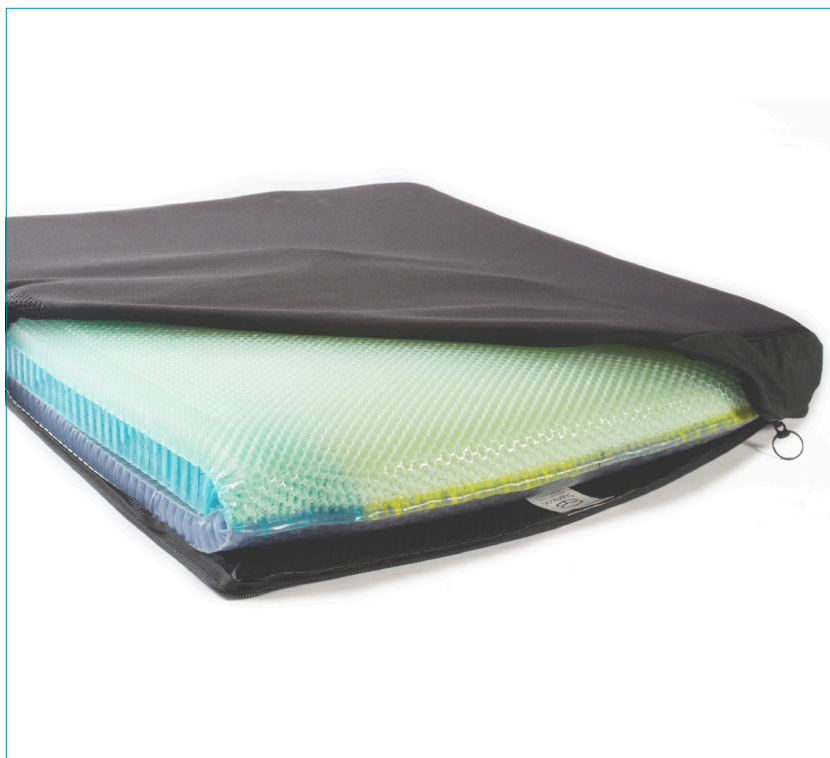

Stimulite® Classic Bariatric pude

Flad siddepude med støttende sider til høj vægt

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat balance, men selv kan forflytte sig.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er forstærket en smule, så puden kan modstå en brugervægt på op til 325 kg.

Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 325 kg
Vægt	3,5-4 kg