


Bari

Trykaflastende bariatrisk skummadras

Bari skummadrassen er et trykaflastende skumprodukt med høj krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Bari er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårkategori 2.

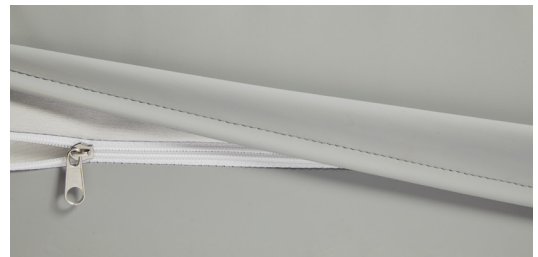

Materiale og opbygning

Bari skumadrassen er med højelastisk koldskum og inkontinensbetræk. Madrassen har opskåret skum på én side med forskellige nedskæringsdybder. Den er opdelt i 5 zoner, som svarer til kroppens trykpunkter. Den er desuden forsynet med en bred skumkant for at sikre en bedre stabilitet ved mobilisering ind og ud ad sengen.

Shear-nedsættende betræk

Bari madrassen har 3 shear-nedsættende zoner (hæl, sacrum og skulder), som beskytter mod de skader, der kan opstå ved forskydning og rotation/forflytning.

Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen.

Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvilken side man står på. Håndtagene er desuden forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

Rengøring


Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om produktet.

Bari

Trykaflastende skummadras - til bariatri

Bari skummadrasen er et trykaflastende skumprodukt med høj krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Bari er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårkategori 2.

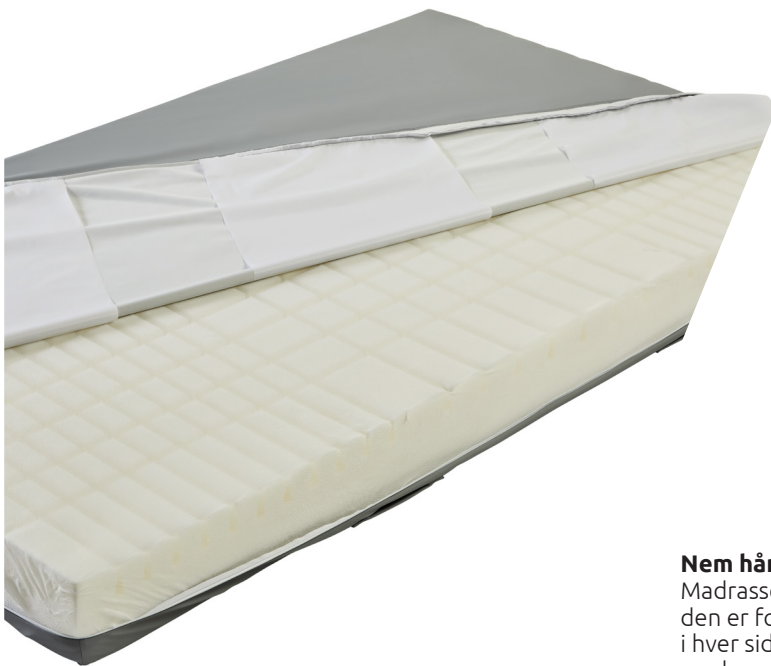

Opbygning

Bari madrassen har 3 shear-nedsættende zoner (hæl, sacrum og skulder), som beskytter mod de skader, der kan opstå ved forskydning og rotation/forflytning.

Materiale

Kombination af brandhæmmet HR PUR skum og brandhæmmet fleksibelt PUR-skum.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man står.

Tekniske data

Bari fås i flere udgaver:

85x200x14 cm

HMI nr.: 112957

Varenr.: Bari20085

90x200x14 cm

HMI nr.: 112960

Varenr.: Bari20090

100x200x14 cm

HMI nr.: 112963

Varenr.: Bari200100

105x200x14 cm

HMI nr.: 112966

Varenr.: Bari200105

110x200x14 cm

HMI nr.: 115474

Varenr.: Bari200110

120x200x14 cm

HMI nr.: 112969

Varenr.: Bari200120

Brugervægt: 80-220 kg

Madrassvægt: Ca. 10 kg, alt efter størrelse

Materiale:

Madrass: Brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet. 50 kg/m³.

Betræk: Åndbart og strækbart

Praktisk anvendelse: Betrækket er udstyret med 4 håndtag, så madrassen er let at håndtere

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om produktet.