
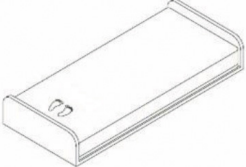
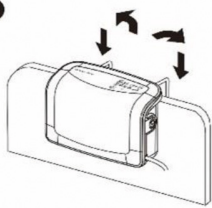


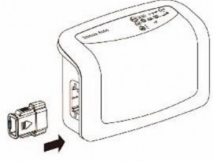

Installationsguide

<p>1</p> 	<p>1: Læg madrassen oven på sengerammen. Vær opmærksom på fodenden (se trykket på betrækket). Fastgør madrassen til de bevægelige dele af sengebunden ved hjælp af stropperne på bagsiden af madrassen.</p> <p>OBS: Hvis der benyttes Domus Auto Topmadrass, skal der lægges en helmadrass nedenunder.</p>
<p>2</p> 	<p>2: Hæng pumpen op på sengehesten (fodenden), og juster bøjlerne, så pumpen står bedst muligt oprejst, eller placer pumpen på en plan overflade.</p>
<p>3</p> 	<p>3: Forbind luftslangens stik fra madrassen til pumpeenheten. Når der mærkes eller høres en "klik" lyd, er forbindelsen fuldført og sikret.</p> <p>OBS: Kontroller og sørg for at luftslangerne ikke er bøjeede eller gemt under madrassen.</p>
<p>4</p> 	<p>4: Sæt strømledningen i stikkontakten.</p> <p>OBS: Placer ikke udstyret, så det er vanskeligt at betjene frakoblingsenheden. Stikket bruges også til at frakoble enheden.</p>
<p>5</p> 	<p>5: Drej derefter hovedafbryderen til positionen ON.</p> <p>OBS: Efter installationen sørg for at slanger og ledninger ikke er i vejen, og at der er uhindret adgang til patienten for plejepersonalet.</p>