

Til universalbrug på højre eller venstre side (25 – 54 cm lægomkreds)

Farve: Grå-blå

Materiale: **Hælsuspension:**

Yderbetræk: Polyester

Skum: Latexfrit polyurethanskum

Velcrobånd: Nylon

Forfodspolstring: Polyester, latexfrit polyurethanskum

Ekstra polstring: Latexfrit polyurethanskum

Positioneringskile:

Betræk: Polyester

Kile: Ethylenvinylacetat-copolymer

Vaskepose: Polyester

Vedligeholdelse: Produktet kræver ingen vedligeholdelse

Designfunktioner: Body Armor® Heel Reliever-hælsuspension fås i 2 versioner: foldet eller glat. Begge produktvarianter er lamineret med et glat stofbetræk, så benet kan „glide“ uden at ændre position af det eksponerede område. En korrekt placering af produktet på patienten opnås med de tre bånd, der holder forfoden og underbenet i en ortograd position. Hvis benet roteres for meget over hoftelæddet, kan den ønskede position opnås med positioneringskilen. En ekstra polstring til området omkring læggen og det plantare fodområde, som medfølger leveringen, gør en individuel, trykaflastende og sikker påføring af produktet mulig. Body Armor® Heel Reliever-hælsuspension kan både anvendes til venstre og højre fod.

Rengøringsanvisninger

Håndvask:

- > Brug et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tørres ved stuetemperatur.

Maskinvask:

- > Luk velcrobåndene, og vask i den medfølgende vaskepose (figur G) eller i et hovedpudebetræk (60 °C). Tørres ved stuetemperatur.
- > Desinficering efter vask: Med en antiseptisk spray

Vand, standard rengøringsmiddel og desinficerende midler kan anvendes til rengøring. Velcrobåndene skal altid være lukkede under rengøring.

OBS

Overhold altid denne brugsanvisning. I tilfælde af bivirkninger (f.eks. hævelser, tryksteder, blodcirkulationsforstyrrelser osv.) bedes du henvende dig til din læge. Ved ukorrekt håndtering af produktet kan der ikke længere garanteres for korrekt funktion og optimal beskyttelse. Dette hjælpemiddel har til formål at helbrede og må kun anvendes i henhold til din læges eller det medicinske sundhedspersonales anvisninger (eller i samråd). DARCO (Europe) GmbH påtager sig intet ansvar herfor. Produktet må ikke bæres på skadet, irriteret, beskadiget eller intakt hud. Du skal f.eks. bruge bandager eller sokker. Dette hjælpemiddel må kun anvendes på én og samme person. Produktet er kun beregnet som støtte. Patienterne må ikke gå, mens de har produktet på.

Bortskaffelse:



- > Skal bortskaffes efter brug.
- > Bortskaf emballagen miljøvenligt. Produktet kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.