


1 BETJENING AF MASSAGEAPPARAT



Det er kun tilladt at anvende massageapparatet med det medfølgende Vibradorm-stik.



Apparatet må ikke bruges, hvis kabler eller kabinetter er beskadigede.

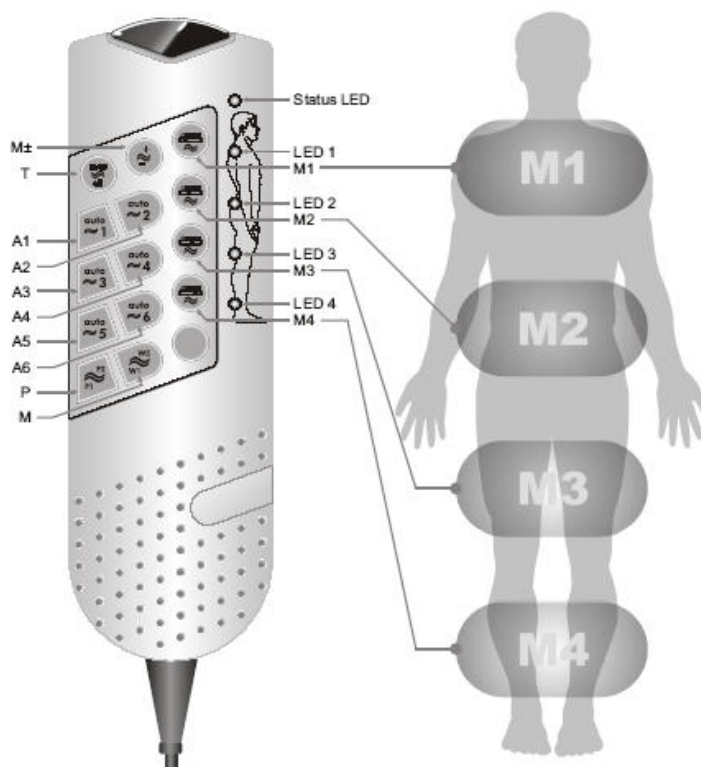

Massageapparatet har følgende driftstilstande:

Statuslampe	
Grønt lys	Massagetimer aktiv i 15 minutter
Rødt lys	Massagetimer aktiv i 30 minutter
Rødt blink	Tryk på en tast


Statuslampe



1.1 MASSAGE TIL-FRA/TIMER

1. Tryk på tasten (T)  for at starte massagen.

Denne starter med den sidst valgte, individuelle indstilling, og massagetimeren er indstillet på 15 minutter (status-LED lyser grønt).


2. Trykkes igen på tasten (T) , skifter timeren fra 15 til 30 minutter (status-LED lyser rødt).
3. Regulering af massageintensiteten foretages med tasterne (M1-M4).
→ 1.2 Individuel indstilling af massageintensiteten i hvert massageområde

Hvis massagemotorerne er blevet slukket, starter massagen med en standardindstilling.

4. Trykkes på tasten (T)  en tredje gang afsluttes massagen.

1.2 INDIVIDUEL INDSTILLING AF MASSAGEINTENSITETEN I HVERT MASSAGEOMRÅDE

For hvert af de fire massageområder (M1-M4) kan massageintensiteten indstilles som følger:

1. Klik på knappen ud for det ønskede massageområde. 

Massageintensiteten opdeles i fem trin, og for hvert tryk på tasten ud for massageområdet øges intensiteten med et trin.

2. Ved sjette tryk på tasten ud for massageområdet, slukkes massagen.

Massagen kan også slukkes ved at holde knappen ud for massageområdet nede i ca. 2 sekunder.

Massagemotorernes driftstilstand vises med på afbildningen med LED1-4.



LED 1

LED 2


LED 3

LED 4

1.3 MASSAGEPROGRAMMER


BØLGEMASSAGE


Massageapparatet kan tilbyde i alt 5 bølgemassageprogrammer.


1. Tryk på tasten **(T)**  for at starte massagen.


Massagetimeren er indstillet på 15 minutter (status-LED lyser grønt). Ved endnu et tryk på tasten **(T)**, skifter timeren fra 15 til 30 minutter (status-LED lyser rødt).

Massagen begynder med den sidst valgte, individuelle indstilling.

2. Tryk på tasten **(M)**  og det første bølgemassageprogram vil starte.

Der skiftes bølgemassageprogram ved at trykke på tasten **(M)** . Der kan vælges blandt 5 bølgemassageprogrammer.

3. Ved tryk på tasten **(M)**  for sjette gang er de individuelle indstillinger atter aktive.

4. Bølgemassageprogrammets intensitet kan indstilles ved tryk på **(M±)**. 

Der er i alt 5 intensitetstrin.


PULSMASSAGE

Massageapparatet kan tilbyde to forskellige pulsmassageprogrammer.

1. Tryk på tasten **(T)**  for at starte massagen.

Massagetimeren er indstillet på 15 minutter (status-LED lyser grønt). Ved endnu et tryk på tasten **(T)**, skifter timeren fra 15 til 30 minutter (status-LED lyser rødt).

Massagen begynder med den sidst valgte, individuelle indstilling

2. Tryk på tasten **(P)**  og det første pulsmassageprogram vil starte.

Der kan skiftes til det andet pulsmassageprogram ved at trykke på tasten **(P)**  igen.

3. Pulsmassageprogrammets intensitet kan indstilles ved tryk på **(M±)**. 

Der er i alt 5 intensitetstrin.

1.3.1 AUTOMATIK-PROGRAMMER

Massageapparatet kan tilbyde i alt seks automatikprogrammerne af ca. 15 minutters varighed. Inden for dette tidsrum skifter massageprogrammerne flere gange automatisk, og brugeren kan derfor læne sig tilbage og nyde den afvekslende massage.



Blid massage

Tast A1 Slumreprogram 1

Tast A2 Slumreprogram 2

Massage med middelhøj intensitet

Tast A3 Refresh-program 1

Tast A4 Refresh-program 2

Meget intensiv massage

Tast A5 Fitness-program 1

Tast A6 Fitness-program 2