

NoDec® Bari

Quickguide

NoDec® BARI justerer sig automatisk efter patientens vægt og position – ingen indstilling skal foretages.

Brug for hjælp?

Ring til os 24-7 på
tlf. +45 70 900 407 eller
se videoguides her:



	• Displayet er låst. • Tryk og hold ned på displayet indtil låsen er åben. • Skærmen er låst op og klar til at navigere rundt i. • Displayet låser automatisk efter 20 sekunder.
Skift (venstre side)	Tryk for ændringer mellem: • Vekseltryk:  • Statisk:  • Maks oppustet (plejefunktion)*:  Slår automatisk fra efter 20 minutter *Bruges ved forflytning og plejeopgaver
Skift (højre side)	Tryk for ændringer i patientkomfort: • Blød • Middel • Fast
OK	Tryk for at bekræfte ændringer.
Annuler	Vend tilbage til normal drift.
Valg	Der er følgende valgmuligheder: • Lysstyrke på display • Lydløs tilstand • Sprog
Rengøring	Efter endt brug sendes madrassen til ZiboCare for vask og service. Under brug overfladedesinficeres pumpe, slange og betræk med en klud med desinfektionsmiddel.

NoDec® Bari

Quickguide

NoDec® BARI justerer sig automatisk efter patientens vægt og position – ingen indstilling skal foretages.

Brug for hjælp?

Ring til os 24-7 på
tlf. +45 70 900 407 eller
se videoguides her:

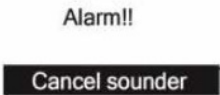
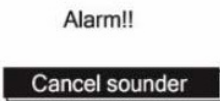
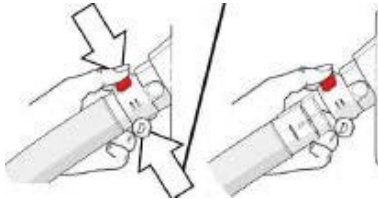


	• Displayet er låst. • Tryk og hold ned på displayet indtil låsen er åben. • Skærmen er låst op og klar til at navigere rundt i. • Displayet låser automatisk efter 20 sekunder.
Skift (venstre side)	Tryk for ændringer mellem: • Vekseltryk:  • Statisk:  • Maks oppustet (plejefunktion)*:  Slår automatisk fra efter 20 minutter *Bruges ved forflytning og plejeopgaver
Skift (højre side)	Tryk for ændringer i patientkomfort: • Blød • Middel • Fast
OK	Tryk for at bekræfte ændringer.
Annuler	Vend tilbage til normal drift.
Valg	Der er følgende valgmuligheder: • Lysstyrke på display • Lydløs tilstand • Sprog
Rengøring	Efter endt brug sendes madrassen til ZiboCare for vask og service. Under brug overfladedesinficeres pumpe, slange og betræk med en klud med desinfektionsmiddel.

NoDec® Bari

Alarmer / fejlfinding

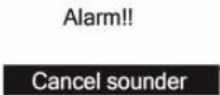
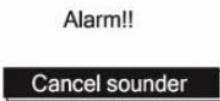
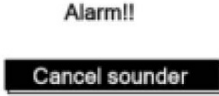
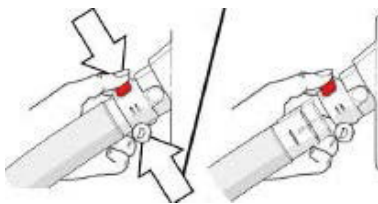
Alle alarmer vises med blinkende rødt lys og lyd.

Højt tryk	  
Årsag	Overtryk i madrassen.
Løsning	Tryk forsigtigt på CPR-knappen og lad en lille smule luft sive ud. Sluk pumpen og tænd igen.
Lavt tryk	  
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Sæt CPR-ventilen i eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i en celle. Sluk pumpen og tænd igen.
Strømsvigt	  
Årsag	Fejl i strømforsyningen eller pumpen er blevet frakoblet strøm.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sluk pumpen og tænd igen.
Nødsituation / Hjertestop, CPR	
Løsning	Grib om slangen der går ind i pumpen og tryk på den røde CPR-knap – slangen springer ud og madrassen tømmes hurtigt for luft.

NoDec® Bari

Alarmer / fejlfinding

Alle alarmer vises med blinkende rødt lys og lyd.

Højt tryk	  
Årsag	Overtryk i madrassen.
Løsning	Tryk forsigtigt på CPR-knappen og lad en lille smule luft sive ud. Sluk pumpen og tænd igen.
Lavt tryk	  
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Sæt CPR-ventilen i eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i en celle. Sluk pumpen og tænd igen.
Strømsvigt	  
Årsag	Fejl i strømforsyningen eller pumpen er blevet frakoblet strøm.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sluk pumpen og tænd igen.
Nødsituation / Hjertestop, CPR	
Løsning	Grib om slangen der går ind i pumpen og tryk på den røde CPR-knap – slangen springer ud og madrassen tømmes hurtigt for luft.