

Pro-care Auto Plus

Trykaflastende vekseltryksmadrass med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Plus er en dynamisk trykaflastende helmadras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig patientens vægt og lejrning. Madrassen består af støjsvage luftceller, som giver patienten ekstra støtte og komfort.



Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.

Opbygning

Pro-care Auto Plus er opbygget som en trykaflastende helmadras i cell-on-cell-design med individuelle, udskiftelige luftceller, der tilsammen giver en stabil og komfortabel liggeflade.

Automatisk trykregulering og brugervenlig indstilling

Madrassen justerer automatisk trykket efter patientens vægt og lejrning, så brugeren får et passende støtte- og komfortniveau.

Pumpen arbejder i vekslende cyklusser, hvor trykket løbende øges og lettes for at give trykaflastning, og den kan desuden anvendes i en mere rolig, statisk indstilling ved behov for ekstra stabilitet.

Hælfunktion

Den enkelte luftcelle kan nemt fjernes for at opnå nultryk og forebygge trykskader på hælen.

Terapi- og cyklustidsindstillinger

Systemet tilbyder flere cyklustider på 10, 15, 20 og 25 minutter, så behandling og komfort kan tilpasses den enkelte situation.

Med tre terapiformer (vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk) giver madrassen fleksible indstillinger til forskellige behov og præferencer hos brugere.

Autofirm-funktion

Funktionen gør madrassen mere fast og stabil ved fx pleje og forflytninger og er tidsbegrænset til ca. 20 minutter, hvorefter pumpen automatisk vender tilbage til den tidligere indstilling.

Betræk til optimal hygiejne

Betrækket er strækbart i alle 4 retninger, vandtæt og åndbart, og fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Plus.

Pro-care Auto Plus

4-vejs strækbart betræk

Designet til at reducere forskydning (shear) og friktion, sikre dampgennemtrængelighed og beskytter mod fugt

CPR ventil

Tøm hurtigt luften ud af madrassen i nødstilfælde

Specielt design af luftceller

Celle-på-celle-design for kontinuerlig trykstøtte

TPU celler

De bløde TPU-luftceller gør madrassen behagelig og støjsvag, også når brugeren bevæger sig i sengen.

Hælaflastning

Den enkelte luftcelle kan nemt fjernes for at opnå nul-tryk og forebygge trykskader på hælen.

Nem vedligeholdelse og reparation

Luftcellerne kan udskiftes individuelt, hvilket gør det lettere at vedligeholde og reparere madrassen.

Transport

Madrassen kan nemt transporteres og kan holde luft i op til 12 timer under transport.

Lydsvag pumpe med nem betjening

Pumpen har et lavt støjniveau. Det intuitive betjeningspanel og topbetjeningen gør den let at betjene og tilgængelig for personalet.

Automatisk tilpasning

Madrassen kan fyldes med luft på 20 minutter. Pumpen indstiller selv trykket efter patientens vægt og lejrning. Pumpen har flere cyklustider og forskellige terapiformer.

Dynamisk vekseltryksmadrass

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto Plus er ideel til bl.a.

behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisikobrugere, borgere og patienter der ikke kan repositionere sig selv, er smerteplagede eller sensitive.

Størrelser:

80x200x20 cm

Varenr.: MDYFN1000
HMI: 128369

85x200x20 cm

Varenr.: MDYFN1001
HMI: 128372

90x200x20 cm

Varenr.: MDYFN1002
HMI: 128375

100x200x20 cm

Varenr.: MDYFN1003
HMI: 130754

Max brugervægt: 250 kg

Madrasvægt: 10 kg

Sammensætning: Støjsvage TPU-celler

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 3,8 kg

Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm

Indstillinger: Cyklus m. intervaller på 10, 15, 20 og 25 minutter

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.