

Domus Auto - Topmadras

Alsidig, dynamisk topmadras

Domus Auto er en fleksibel, trykaflastende luftmadras, der kan bruges både som topmadras og helmadrass og bl.a. giver mulighed for at aflaste tryk ved hælene med indstilling af O-tryk.



Udfordring: For både patienter og plejepersonale er vendinger og forflytninger en udfordring, som kræver ekstra tid og går ud over velvære og arbejdsmiljø. En topmadras fra Domus Auto er en del af løsningen.

Egenskaber

Domus Auto topmadras består af 17 enkelte luftceller, der hver er 13 cm høje. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.

Brugertilpasset tryk

Madrassen indstiller automatisk trykket i madrassen efter brugerens vægt, og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk, og det er muligt at indstille siddefunktion.

Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der dannes O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

Autofirmfunktion

Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

Åndbart og strækbart betræk

Betrækket er strækbart og åndbart. Det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen. Alle syninger i betrækket er svejsede for at sikre optimal hygiejne.

Anvendt som helmadrass


Hvis Domus Auto Topmadras bruges som helmadrass, skal der placeres en top- eller sikkerhedsmadrass i den indbyggede lomme i madrassetrækket.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

Domus Auto - Topmadras

Alsidig, dynamisk topmadras

Domus Auto er en innovativ luftmadras med mange specialfunktioner, fx CPR-funktion, som sikrer, at madrassen tømmes hurtigt for luft i akutte situationer.

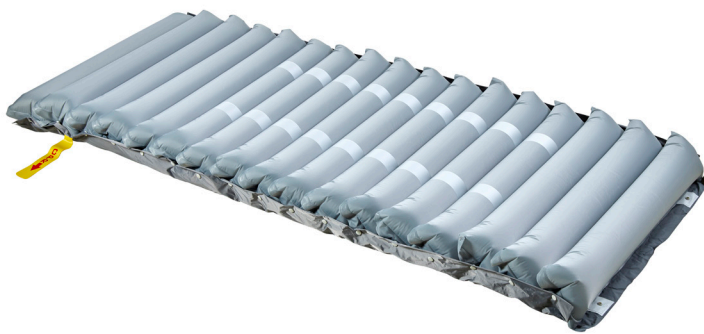

Autofirmfunktion

Autofirm slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

Brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstilles automatisk efter brugerens vægt, og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket.

CPR-funktion

Madrassen har CPR-funktion.

Betræk

Betrækket er strækbart og fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen. Materialet er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Tekniske data

Topmadras

80x200x13 cm
REF: MDYT1180
HMI nr.: 119747

83x200x13 cm
REF: MDYT1183
HMI nr.: 139548

85x200x13 cm
REF: MDYT1185
HMI nr.: 119750

88x200x13 cm
REF: MDYT1188
HMI nr.: 139551

90x200x13 cm
REF: MDYT1190
HMI nr.: 119753

Betræk: Åndbart, inkontinens og brandhæmmende PU-betræk der er strækbart i alle retninger. Integreret ledningsophæng.

Sårkategori og risikovurdering: Behandling til og med stadie 3 samt forebyggelse til høj risiko.

Brugervægt: 30-200 kg

Max belastningsvægt: 250 kg

Madrasmvægt: 5,6 kg

Sammensætning: 17 celler

Materiale: Betræk: Nylon/PU, lilla Celler: Nylon/PU, lilla Bundstykke: PU/nylon, mørkegråt

Rengøring: Betrækket kan vaskes ved max. 90° C.

Topbetjent pumpe

Terapi: Dynamisk, Statisk, Maxfirm, Seat inflate.

Lydsvag – under 28 dB(a)

6 komfortniveauer

Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald

Elektricitet: AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklustid: 10 min.

Dimensioner: H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

Pumpevægt: 2,3 kg

Rengøring: Desinficeres med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler på en opvredet klud.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.