

## NoDec® Wizard

# Kombimadras øger velvære og giver færre omkostninger

En kombinationsmadras klarer både vendinger og vekseltryk. Den nyeste teknologi giver bedre arbejdsmiljø for personalet, bedre velvære for patienterne - og sparer både tid og kroner.



Udfordring: Tryksår er smertefuld - og kan forebygges. Men det kræver hyppige vendinger og forflytninger - det påvirker patienternes velvære og er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for personalet.

### Fordele for patienten/borger:

- Reducere risikoen for tryksår og opheler sår hurtigere.
- Reducere smerter og dermed medicinforbruget
- Giver rolig og uforstyrret søvn. Hurtigere rehabilitering, overskud og energi til træning
- Reduceret indlæggelsestid

### Fordele for sundhedspersonalet

- Færre arbejdsskader og sygemeldinger
- Nedsat ressourceforbrug til vendinger og forflytninger. Frigiver ressourcer til andre opgaver
- Reducere udbrændthed og øger arbejdsglæden
- Reducerede omkostninger til sårbehandling/ medicinbehandling.

### Unik ved specielle behov

- Har urolig, utryg eller udadreagerende adfærd, f.eks. patienter med delir, demens, psykiske lidelser, hvor kontakt bør undgås for ikke at forværre deres situation eller ikke kan forstå/samarbejde til vendinger.
- Intensive patienter, med behov for ro og optimeret lungefunktion
- Smerteplagede (cancerpatienter, terminale patienter, gigtpatienter, hoftenære frakturer præoperativt.)
- Neurogene sygdomme ( Stive /tunge patienter med øget muskeltornus, ALS patienter, Tetra / parapletikere, Sclerose patienter, Lungepatienter eller patienter med respiratoriske udfordringer.)

Læs mere om NoDec Wizard og andre hjælpemidler på [zibocare.dk](http://zibocare.dk)




ZiboCare®

NoDec® Wizard

# Vendinger og vekseltryk i en kombinationsmadras

NoDec® Wizard er en kombinationsmadras, der tilpasser sig patientens behov, vægt og position. Kombinerer vendinger, vekseltryk samt kontrollerer fugt og temperatur og nedsætter risiko for tryksår. Let at betjene, giver bedre fysisk arbejdsmiljø og sparer tid.

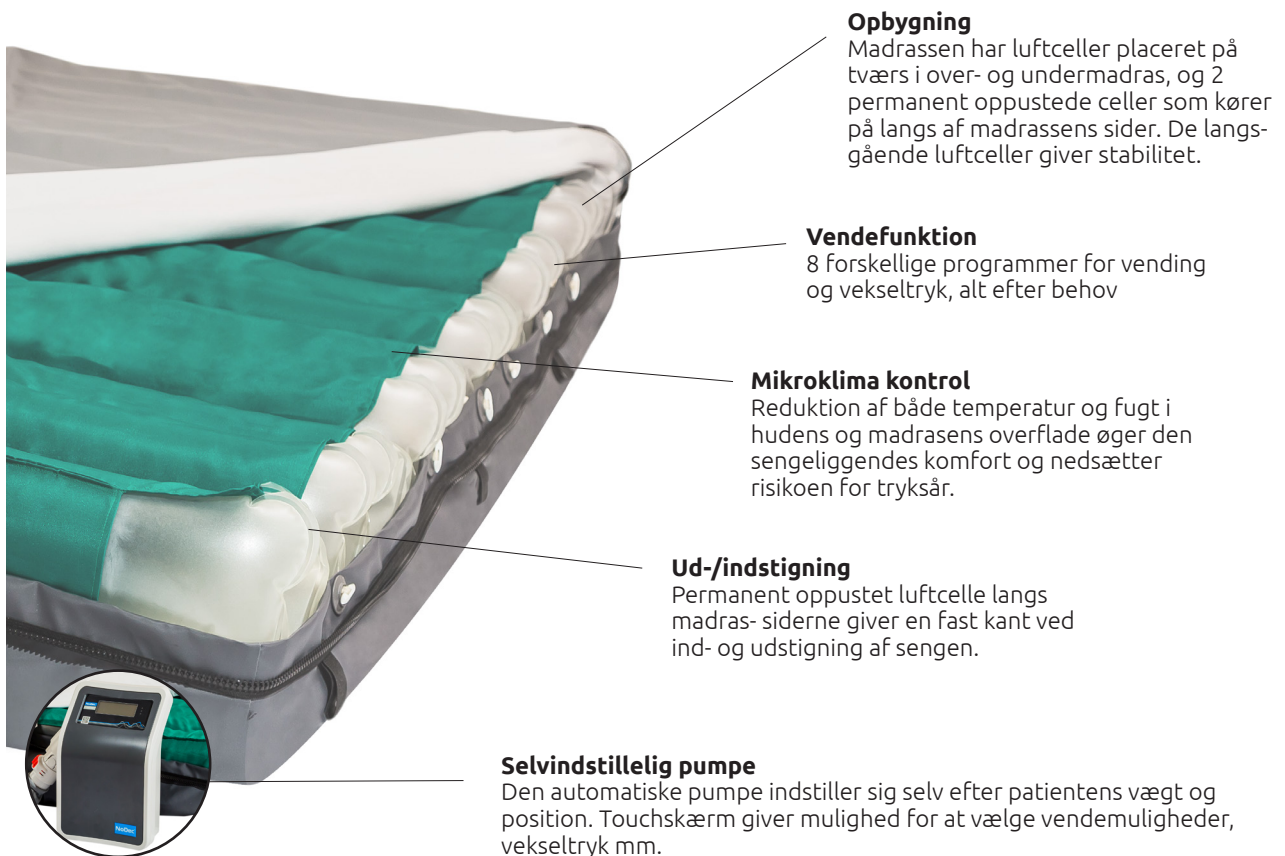

## Før: smerter og uro

Ældre kvinde med sclerose og demens. Er meget udadreagerende, slår, bidder og sparker ved pleje, forflytning og lejring.

Hun har sår, der ikke er bedret ved sårbehandling og brug af vekseltryk. Kvinden har smerter og sover dårligt om natten pga afbrudt søvn ved vendinger om natten.

## Efter: velvære og vågen

Kvinden udviser efter to uger på NoDec® wizard madrassen ingen udadreagerende adfærd og arbejdsmiljøet er forbedret for personalet.

Såret er begyndt at hele og borger får sammenhængende og uforstyrret søvn ved de automatiske vendinger. Er frisk og vågen i dagtimerne.

Vores faglige konsulenter er klar med gode råd og valg af den rigtige specialmadras. Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. Ring: 76 900 407

# Produkt information

## Klinisk afprøvet

- V-formede luftceller bevarer formen under kroppen, således at kontaktrykket fjernes fra eksakt samme område som trykket er påført.
- Kontinuerlig vendefunktion skabes ved skiftevis at lukke luft ud af de V-formede celler i højre og venstre side af madrassen.
- Valg af vendeinterval vha. touchskærm.
- 3-celle-cyklus veksletryksystem med 50% mere støtte. Systemet gør det lettere at udløse trykket fra et kropsområde og opnå 0-tryk.
- Vacuum assisteret luftcelle sikrer komplet fjernelse af luft fra tømte celler.

## Brugersikkerhed og komfort

- Touchskærmprogram giver mulighed for valg af både veksletryk, statisk-, og vendefunktion.
- Ergonomisk touchskærm som automatisk indstiller sig efter brugerens vægt- og lejringsændringer.
- Komfortkontrol med tre indstillinger. Tillader individuel justering der tilpasses til den enkeltes komfort eller ud fra kliniske vurderinger.
- Ved strømsvigt forbliver madrassen luftfyldt i mindst 6-8 timer, afhængig af personens vægt.
- Den permanent oppustede luftcelle langs madrassiderne giver en fast madraskant ved ind- og udstigning fra seng til stol el lign.

## Værd at vide:

- Skånsom vending af den sengeliggende.
- Hurtig tømning vha. CPR ventil.
- Intuitiv touch-skærm giver let betjening af madrassens funktioner.
- Omstilling til plejefunktion ved behov. Eksempelvis ved pleje og træning. Giver en fast og stabil overflade.
- Plejefunktion skifter automatisk over til automatisk funktion efter 20 minutter.
- Transportmode.
- Akustisk og visuel alarm.
- Ledningsholder integreret i madraskanten. Fri for ledninger på gulvet.
- V-Lock-system forhindrer uheld med frakobling af strømkablet.
- Kontrolpanel låser automatisk efter 2 minutters inaktivitet.
- Tydeligt markeret fodende på madrassetræk sikrer korrekt placering i sengen.

## Mikroklima kontrol

- Høj fordampningsevne på betrækkets overside giver mulighed for kontrol af mikroklimaet.
- Reduktion af både temperatur og fugt i hudens og madrassens overflade øger den sengeliggendes komfort og nedsætter risikoen for tryksår.

## Hygiejnebetræk

- Betræk med svejsede sømme forhindrer indtrængning af væske i madrassen.
- Betræk tåler vask op til 90 grader.
- Det glatte betræk reducerer shear og friktion.
- Tåler aftørring med desinfektionsmiddel.
- 360° lynlås sikrer at madrassovertæk let kan fjernes ved behov for vask og rengøring af celler.
- Lynlås er beskyttet af overlæg på madrassetrækket.

## Brugervægt

Max 250 kg

## Madrass mål

85x200x25 cm (HMI nr.: 102485)  
90x200x25 cm (HMI nr.: 110046)  
85x210x25 cm (HMI nr.: 102486)  
90x210x25 cm (HMI nr.: 102487)

## Madrass vægt

11 kg

## Materiale

Celler: PU  
Betræk: 2-vejs strækbart PU-coated nylon

## Madrass: bedømmelse af brandhæmmende egenskab

Er i overensstemmelse med BS7175 tændkilde 0.1 og 5

## Strømenhed: bedømmelse af brandhæmmende egenskab

UL94 V-9-0/IP 42

## Strømforsyning

230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz 20 W max

## Pumpe mål

40x16x25 cm

## Pumpe vægt

6,8 kg

## Klassifikation

Klasse B Medicinsk udstyr. Klasse II