



ZiboCare

## Tekniske data

### Madras

7,5 kg | 85x200x20 cm

HMI-nr.: 88096

Varenr.: MDYF1140

### Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm

Cyklus tid:

10/15/20/25 min.

### Elektricitet

AC230V

50/60 Hz, 0,07A

### Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra



# Pro-care 4

## Dynamisk trykaflastende helmadras til højrisko

Den dynamiske helmadras Pro-care 4 består af 20 enkelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Denne patenterede opdeling kaldes 'Cell-on-Cell'. 9 af cellerne har LOW-AIR-LOSS funktion, som bortleder både fugt og varme og på den måde holder brugerens hud tør. Madrassen anvendes forebyggende og behandlende ved kategori 1, 2, 3 og 4.

### Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt og pumpen kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 min., som skiftevis øger og letter trykket. Regulerbar cyklostid med mulighed for indstilling til 15, 20 og 25 min.

### Betræk med glidefunktion

Betrækket er 2-lags oversize med indbygget "glidefunktion", der forebygger shear og friktions kræfter. Kan leveres med guiltet, åndbart betræk. Betrækket fastgøres med lynlås på alle sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde igennem.

### Pumpefunktioner

Pumpen kan desuden indstille trykket til at være statisk eller til siddefunktion. Hvis trykket er for lavt, går en alarm i gang. Autofirm-funktionen gør madrassen fast ved pleje og slår automatisk fra efter 20 min.

### Hælaflastning

De 5 celler i fodenden kan afkobles uden brug af propper. De lukker automatisk.

### Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

<b>Brugervægt</b>	40-200 kg
<b>Madras-sammensætning</b>	20 cell-on-cell luftceller
<b>Materiale</b>	Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt Celler: PU, klare/lyseblå Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt
<b>Pumpe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lydsvag</li><li>• 10 komfortniveauer</li><li>• Dynamisk/statisk</li><li>• Audiovisuel alarm</li><li>• Panellås</li></ul>
<b>CPR-funktion</b>	Drejeknap
<b>Praktisk anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilering af patient</li><li>• Regulerbar cyklostid</li><li>• Med ledningsophæng</li></ul>