



ZiboCare



Tekniske data

Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm Cyklus tid: 10 min.

Elektricitet AC230V

50/60 Hz, 0, 07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensorteknologi
- Alarm til/fra



Pro-care Auto Bariatric

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

Trykaflastende helmadras Pro-care Auto Bariatric består af 20 en-celte luftceller, der hver er 20 cm. høje. Cellerne er i de-signet Cell-on-Cell. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Maxfirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Glat eller strækbart betræk

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver;

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Betrækket fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Hælfunktion

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet, for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Brugervægt	30-450 kg
Sammensætning	20 cell-on-cell luftcelle
Materiale	Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt Celler: Nylon/PU, gråt Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt
Funktion	Integreret ledningsholder. 5 celler i hældelen kan afkobles med quickconnection
Vedligeholdelse	Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.