



ZiboCare

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskaar

36x36x5x9x7,6 cm HMI nr.: 87921 Varenr.: CDSX1414	46x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 39915 Varenr.: CDSX1818
36x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51306 Varenr.: CDSX1416	46x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41937 Varenr.: CDSX1820
36x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51342 Varenr.: CDSX1418	51x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 100992 Varenr.: CDSX2016
41x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 39914 Varenr.: CDSX1616	51x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 41938 Varenr.: CDSX2018
41x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 40628 Varenr.: CDSX1618	51x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 49935 Varenr.: CDSX2020
41x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 48969 Varenr.: CDSX1620	56x46x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51307 Varenr.: CDSX2218
46x41x5x9x7,6 cm HMI nr.: 49895 Varenr.: CDSX1816	56x51x5x9x7,6 cm HMI nr.: 51308 Varenr.: CDSX2220



Stimulite® Contour Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt toplag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 125 kg
Vægt	1,6 kg