



Tekniske data

80x200x14 cm

HMI nr.: 120714

Varenr.: 80200ZIBODUO

85x200x14 cm

HMI nr.: 120717

Varenr.: 85200ZIBODUO

88x200x14 cm

HMI nr.: 120720

Varenr.: 88200ZIBODUO

Patientens stilling skal ændres regelmæssigt ved brug af et venderegime, madrassen kan ikke stå alene i behandlingen.



Zibo Duo

Madras med 2 skumkerner til forebyggelse af tryk og Shear

Zibo Duo er en trykaflastende skummadras med høje krav til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt. Zibo Duo er anbefalet til tryksårforebyggelse op til mellem/høj risiko eller sårkategori 3.

Materiale og opbygning

Zibo Duo består af 2 skumkerner, som kan glide på hinanden, og dermed reducere Shear hos borgeren. Toplaget er zoneopskåret skum med forskellige nedskæringsdybder. Madrassen er opdelt i 5 zoner så det svarer til kroppens trykpunkter. Basen er lavet af en stabil skum, for at sikre stabilitet ved mobilisering ind og ud ad sengen.

Anti-shear

Det specialdesignede multistrækbetræk har 3 shearnedsættende zoner under hæle, sacrum og skulderblade. Det beskytter mod de skader, der kan opstå med forskydning og rotation/forflytning.

Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart hygiejnebetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et overlap, der forhindrer væske i at trænge ind igennem lynlåsen til skumkernen. Undersiden er i skridsikkert materiale.

Madraskernerne er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til borgeren.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med 4 håndtag, så man altid kan løfte madrassen ud af sengen. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid.

Rengøring

Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Brugervægt	0-150 kg
Vægtfylde	52 kg/m ³ = stabilitet og høj levetid
Materiale	Madras: Brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet Betræk: Åndbart og strækbart PU
Madrasvægt	Ca. 12 kg, alt efter størrelse