



ZiboCare

### Tekniske data

#### Junior

**3 kg | 100x140 cm**  
HMI nr.: 105487  
Varenr.: KDS600542

**5 kg | 100x140 cm**  
HMI nr.: 105488  
Varenr.: KDS600544

#### Voksen

**4 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 114544  
Varenr.: KDS600280

**6 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 114548  
Varenr.: KDS600281

**8 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 114551  
Varenr.: KDS600282

**10 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 114554  
Varenr.: KDS600283

**12 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 114556  
Varenr.: KDS600284

**14 kg | 140x200 cm**  
HMI nr.: 1144559  
Varenr.: KDS600285

Kædedyne® Sensitive er CE-mærket. Patenteret.  
Kædedyne® Sensitive produceres i Sverige af  
Somna og ZiboCare A/S er eneforhandler i Danmark.



## Kædedyne® Sensitive

### Blød og lun – som almindelig dyne

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer brugeren til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, og dynen er dermed lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar.

#### Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

#### Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Kædedyne Sensitive er en blødere kædedyne end den almindelige Kædedyne®, da den har dobbelt så meget polstring på den polstrede side. Dette giver en varmere og blødere dyne, der via dynens tyngde, stadig giver dyb proprioceptiv stimulation. Kædedyne® Sensitive vælges ofte af brugere, der ønsker en vægtdyne, der både giver mulighed for graduering af stimuli og er blød som en helt almindelig dyne.

#### Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser
- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom

- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD
- Smerteproblematikker

#### Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. Alle Kædedyne® Sensitive varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.

#### Leveres med både vaskepose og transporttaske.

*Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes.*

### Tilbehør

**Hygiejnebetræk  
m/ lynlås på 3 sider**

**Junior**  
HMI nr.: 81534  
Varenr.: KD700411

**Voksen**  
HMI nr.: 81535  
Varenr.: KD600410

**Bomuldsbetræk  
m/ lynlås på 3 sider**

**Voksen**  
Varenr.: KD600466