


Installationsguide

Pro-care Bariatric

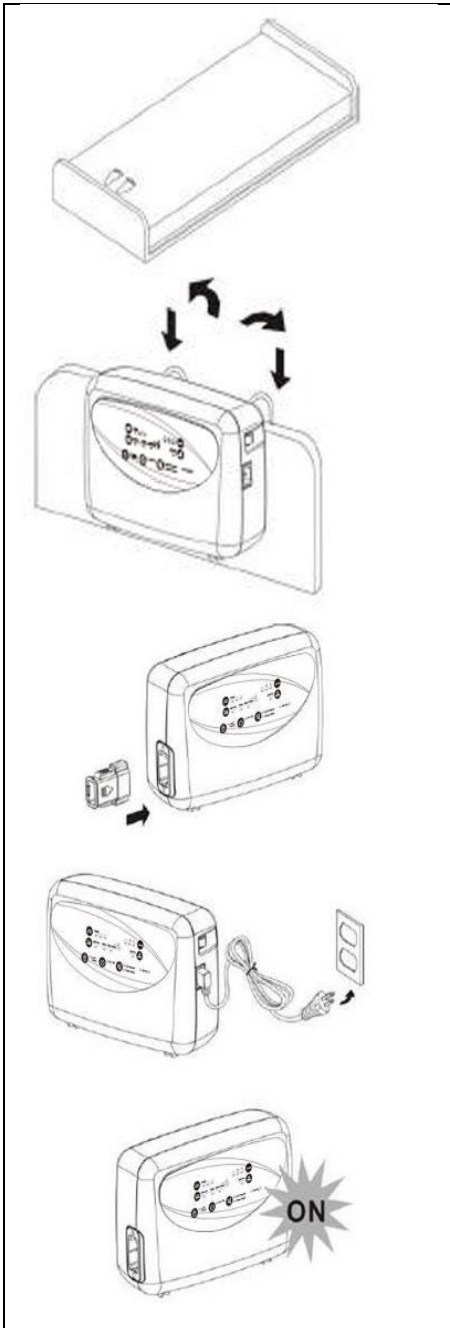

1. Placer madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til de *bevægelige* dele af sengebunden. Vær opmærksom på korrekt placering af fodende (se fodtryk).
2. Hæng pumpen på sengegavlen (fodenden), eller placer pumpen på et fast lige underlag.
3. Sæt slangerne fra madrassen i pumpen. Når der høres et klik, er slangen korrekt fastgjort.
4. Fastgør ledningen i ophæng på siden af madrassen. Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd.
5. Tænd for pumpen både på hovedafbryderen på siden af pumpen og på "powerknappen"

 forrest på pumpen.

6. Check at CPR-ventilen på siden af madrassen, i hovedenden, er drejet om på "close".

Vent ca. 20-30 minutter og madrassen er fuldt oppustet og klar til brug.

7. Indstil cyklustid og patientvægt (se quickguide eller brugermanual).



Quickguide

Pro-care Bariatric

 Power	Tænd/sluk for pumpen
 Lock/unlock - Låsefunktion	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min.
 Vægtindstilling	Indstilling af patientens vægt og komfortniveau. Udfør altid håndtest for at sikre rigtig indstilling i forhold til patientens vægt.
 Cyklustid	Tryk på knappen for at indstille cyklustid for vekseltryk. Cyklustid vælges ud fra patientkomfort og tryksårsrisiko/sårkategori.
 Terapi-valg	 Max Firm: Anvendes ved pleje/mobilisering Slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på Max firm knappen igen.  Alternate: Dynamisk funktion. Systemet vil veksle trykket i cellerne hvert 10. minut.  Static: Statisk funktion. Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.  Seat Inflate: Sidde funktion Giver borgeren yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise).
 Alarm	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.

Alarmer

Pro-care Bariatric

Low pressure Lavt tryk	Low pressure lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen. Kontakt depotet hvis problemet ikke kan løses.
Power failure Strømsvigt	Power failure lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sikr dig at pumpen er tændt.
Service Tid til serviceeftersyn	Lampe lyser ud for  ved  symbolet
Årsag	Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.
Løsning	Kontakt depotets tekniker for hjælp, eller kontakt ZiboCare.
NØDSITUATION HJERTESTOP, CPR	 Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i hovedenden.
Løsning	CPR-ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.