

Quickguide Pro-care Auto

 Power	Tænd/sluk for pumpen.
 Låsefunktion	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på hængelås-symbolet i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min.
 Plejefunktion	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Funktionen slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på plejefunktions-knappen igen.
 Automatisk trykindstilling	Juster trykket i madrassen baseret på patientens vægt – når der kun er ét lys er trykket indstillet. OBS - pumpen indstiller løbende trykket, alt efter brugerens position. AUTO-knappen er kun til brug ved ønske om øjeblikkelig justering.
 Komfortindstilling	"0" er det tryk systemet automatisk finder. "+" er et lidt højere tryk = mere fast madras. "-" er et lidt lavere tryk = blødere madras.
 Terapi-valg	 Vekseltrykfunktion: Systemet vil veksle mellem hver 2. celle tømt for luft, og hver anden celle fyldt med luft, hvert 10. minut.  Statisk funktion: Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler. Funktionen slår tilbage på vekseltryk efter 20 minutter. LED lampen blinker.  Konstant lavt tryk: Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler. LED lampen lyser konstant.  Siddefunktion: Siddefunktion giver brugeren yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise).
 Alarm	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.

Alarmer

Pro-care Auto



Scan QR-koden og få mere information om ProCare Auto på www.zibocare.dk

24 timers teknisk service: tlf.: 70 900 407

LAVT TRYK	Lavt tryk lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen.
STRØMSVIGT	Strømsvigt lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sikre dig at pumpen er tændt.
SERVICE Tid til serviceeftersyn	En grøn lampe lyser ud for servicesymbolet 
Årsag	Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.
Løsning	Kontakt ZiboCare for hjælp.
NØDSITUATION HJERTESTOP, CPR	 Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i hovedenden.
Løsning	CPR-ventilen drejes så luften hurtigt tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.