

Quickguide

Trykvogteren Hybrid

Hybridmadras til forebyggelse og behandling af tryksår tom. stadie 4

1. Læg madrassen på sengen.
2. Hæng pumpen på ende gavlen (fodenden), ved hjælp af de to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af sengen.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen.
4. Sæt strømstikket til og tænd for pumpen. Pumpen vil alarmere for lavt tryk. Tryk på 
5. Pumpen fylder nu madrassen. Der kan ikke stilles på pumpen før madrassen er fyldt.
6. Når madrassen er helt fyldt (fast) vil pumpen gå på ALTERNATE og stille sig på sidst indstillede komfort.
7. Indstil komforten i madrassen ud fra brugerens ønske.
8. Indstil den ønskede terapi funktion.

Indstillinger

Trykvogteren Hybrid

Hybridmadras til forebyggelse og behandling af tryksår tom. stadie 4

Tryk/komfort	 1 2 3 4 5  Comfort Level Regulering af madrassens hårdhed. Indstil efter brugerens ønske for komforten.
Terapiform Indstil den ønskede terapi ved at trykke på knappen indtil der er lys ved det ønskede. 	 Alternate Float Auto Firm Autofirm Bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel fast/hård så det er lettere at arbejde. Denne funktion holder i 20 minutter. Herefter vender pumpen tilbage til ALTERNATE og den tidligere valgte komfort indstilling.  Alternate Float Auto Firm Alternate Vekseltryksfunktion med skiftende tryk i madrassens luftceller.  Alternate Float Auto Firm Float Stillestående/statisk funktion.
Audible alarm On/Off 	Opstår der en fejl kan det høres og ses på pumpen. Lyden kan slås fra ved at trykke på ALARM-knappen. Hvis fejlen ikke rettes i løbet af 5 minutter starter alarmen igen.