




## Quick guide

### Fjernbetjening

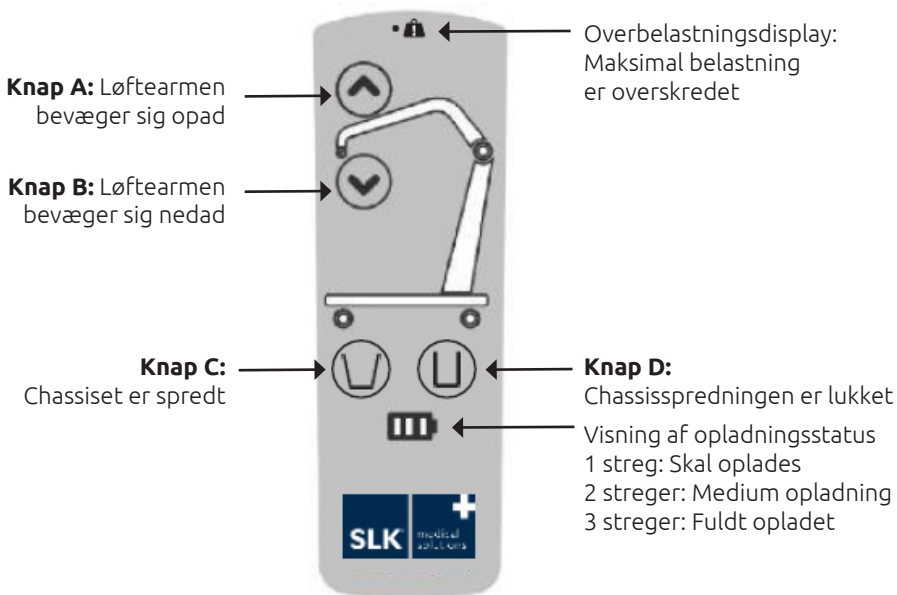

### Kontrolboks

Tryk kortvarigt på en af de to knapper A eller B (< 0,5 sek.), så åbnes det næste menupunkt. Ved at trykke og holde (> 0,5 sek.) knappen A eller B flyttes der mellem menupunkterne.



#### 1: Løftearm

Knap A: Løft løftearmen  
Knap B: Sænk løftearmen



#### 2: Chassisspredning

Knap A: Spred chassiset  
Knap B: Luk chassiset



#### 3: Opladningsniveau



## Transport af patienter

SLK Carry 185 Classic e kan bruges til både transport af patienter i siddende og liggende stilling. Scan QR koden og se hvordan du anvender personløfteren i de forskellige situationer.



## Betjening af bremses

Bremserne på personløfteren er placeret på de bageste hjul. Aktiver altid begge bremses for at stoppe liften.



Træd på bremsepedalen oppefra indtil den går i indgreb



Slip bremsen ved at løfte bremsepedalen med tåspidsen

## Opladning

Sørg for at personløfteren er tilstrækkeligt opladt inden brug. For at oplade batteripakken skal nødstopknappen være låst op. Opladningstiden er ca. 4 timer.



Åbn silikonestikket, og tilslut opladeren til kontrolboksen.



Sæt opladerens netstik i en stikkontakt.

Under opladningen lyser LED'en på opladeren orange.

Displayet skifter til grønt, når min. 80% opladning er nået.

## Vedligeholdelse og rengøring

For at rengøre SLK Carry skal du bruge en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel, f.eks. et husholdningsrengøringsmiddel. For at rengøre og desinficere opladeren, skal den fjernes fra stikkontakten inden rengøring!


### Nødstop

#### Tryk den røde kontaktpil nedad.

Nødstopknappen kan bruges til at stoppe løfte- eller sænkebevægelserne.

Personløfteren skal stoppes øjeblikkeligt, hvis der er fare på færde.

Når faren er afværget kan nødstopknappen låses op ved at dreje den med uret

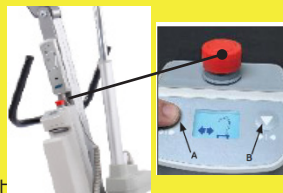

## Mere information



For mere udførlig information se den medfølgende brugsanvisning